

WELCHE PFLEGE ZU WELCHER LINSE? – EIN EMPFEHLUNGS-LEITFADEN.



	Pfllegesysteme					Zusatzprodukte			
	für weiche Kontaktlinsen		für formstabile Kontaktlinsen			Abspül-Lösung	Oberflächenreiner	Proteinentfernungstabletten	Nachbenetzungslösung
	AOSEPT PLUS	SOLOCARE AQUA	BLUE VISION	TITMUS H2O2+	AQUA TOUCH	SoftWear Saline	Miraflow	Unizyme	AQuify
AIR OPTIX[®] <small>Kontaktlinsen</small>	+++	++	+++	+	-	+++	++	+	++
DAILIES[®] <small>EIN-TAGES-KONTAKTLINSEN</small>	-	-	-	-	-	+	-	-	+++
Focus Visitint Precision UV FreshLook	++	+++	++	++	-	+++	+	+	+++
Konventionelle weiche Kontaktlinsen*	+++	++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
Konventionelle formstabile Kontaktlinsen*	++	-	-	+	+++	+++	+++	+++	+++

* Herstellerspezifische Empfehlungen sollten berücksichtigt werden.

+++ optimal ++ sehr gut geeignet + geeignet - nicht geeignet

TIPPS FÜR VERTRÄGLICHES KONTAKTLINSENTRAGEN:

- Vor jeder Handhabung immer die Hände waschen
- Pflegeprodukte immer gemäß der Anleitung anwenden
- Niemals unneutralisierte Peroxid-Lösung ans Auge bringen
- Niemals Leitungswasser verwenden
- Kontaktlinsenbehälter regelmäßig austauschen
- Kontaktlinsen gemäß den Empfehlungen des Kontaktlinsenanpassers tragen
- Regelmäßige Kontrollen einhalten

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Fachanpassberatung Tel.: 0 60 26-941 111

Meine Kundennummer:

CIBA VISION Vertriebs GmbH
Postfach 10 02 24
63702 Aschaffenburg
www.cibavision.de

CIBA VISION[®]
PROFESSIONAL

KONTAKTLINSEN-PFLEGE VON CIBA VISION™



Pflege für weiche Kontaktlinsen

Pflege für formstabile Kontaktlinsen

Zusatzprodukte

AOSEPT PLUS



SOLOCARE AQUA



BLUE VISION



TITMUS H2O2+



AQUA TOUCH



	AOSEPT PLUS	SOLOCARE AQUA	BLUE VISION	TITMUS H2O2+	AQUA TOUCH
Systemtyp	<ul style="list-style-type: none"> • 3%iges Wasserstoffperoxid • Neutralisation durch Platinkatalysator 	<ul style="list-style-type: none"> • All-in-One-Lösung 	<ul style="list-style-type: none"> • 3%iges Wasserstoffperoxid • Neutralisation durch Tablette 	<ul style="list-style-type: none"> • 3%iges Wasserstoffperoxid • Neutralisation durch separate Lösung 	<ul style="list-style-type: none"> • Systempflege für formstabile Kontaktlinsen
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelwirkformel: reinigt und desinfiziert • ohne Konservierungsstoffe 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Wasserbindung • schnelle Anwendung • antibakterieller MicroBlock™ Behälter 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Reinigungs- und Desinfektionsleistung durch Retardtablette • ohne Konservierungsstoffe 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellstes Wasserstoffperoxid-System • ohne Konservierungsstoffe • mit Washer-Behälter 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Reinigung und Desinfektion • antibakterieller MicroBlock™ Behälter
Komfort-Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Tiefenreinigung für lang anhaltenden Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewahrt die Feuchtigkeit für lang anhaltenden Tragekomfort durch Provitamin B5 und Sorbitol 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtigkeitserhaltende Komfort-Pflege mit Eudragit und HPMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Benetzung durch HPMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Provitamin B5 und Sorbitol für gute Benetzung
Kompatibel mit Silikon-Hydrogelen	+++	++	+++	+	-
Inkl. Proteinentfernung	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja (durch AQUA TOUCH Tablette)
Anwendung*	<ul style="list-style-type: none"> • Linsen im Körbchen 5 Sekunden mit AOSEPT PLUS abspülen: „Power-Dusche“ • selbsttätige Neutralisation (6 Stunden) 	<ul style="list-style-type: none"> • Linse mit 3 Tropfen pro Seite 10 Sekunden reiben • 10 Sekunden abspülen, dann mindestens 5 Minuten einlagern 	<ul style="list-style-type: none"> • Linsen in BLUE VISION Lösung plus Tablette einlagern • Selbsttätige Neutralisation (6 Stunden) • Blauindikator beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stunden Einlagerung in Lösung 1 • 20 Minuten Neutralisation in Lösung 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Linse mit 10 Tropfen Reiniger 30 Sekunden reiben • Gründlich mit Aufbewahrungslösung abspülen, dann mindestens 1 Minute einlagern
Abreiben erforderlich	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Mindest-Einlagerungszeit	6 Stunden	5 Minuten	6 Stunden	2 Stunden (in Lösung 1) 20 Minuten (in Lösung 2)	1 Minute
Maximale Einlagerungszeit	14 Tage	30 Tage	14 Tage	30 Tage (in Lösung 1) 2 Stunden (in Lösung 2)	30 Tage

SoftWear Saline

- Konservierungsmittel-freie Kochsalz-Lösung
- Hervorragende Ergänzung für Wasserstoffperoxid-Systeme
- Ideale Abspül-Lösung für alle Kontaktlinsen und Behälter



Unizyme

- Universelle Proteinentfernungstablette
- für alle Kontaktlinsen



Miraflow

- 3-fach aktiver Reiniger mit hoher Desinfektionsleistung und Reinigungswirkung auf Alkoholbasis
- für alle Kontaktlinsen



Aquify

- Hightech-Nachbenetzungslösung mit Hyaluronsäure
- ohne Konservierungsstoffe
- auch für Nicht-Kontaktlinsenträger



* für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitungen des jeweiligen Produktes

+++ optimal ++ sehr gut geeignet + geeignet - nicht geeignet