

Kontaktlinsen-Pflegemittel

EIN-FLASCHEN-SYSTEM
SOLOCARE AQUA®

PEROXID-SYSTEM
AOSEPT® PLUS

REINIGEN
Unizyme®

ABSPÜLEN
SoftWear® Saline Plus

BENETZEN
AQuify®

SOLOCARE AQUA®

SOLOCARE AQUA® – bewahrt die Feuchtigkeit
Für lang anhaltenden Tragekomfort

Anwendungsempfehlung:

- Für weiche Kontaktlinsen
- Hervorragend geeignet für Silikon-Hydrogele
- Auch besonders für Austauschlinsen und Farblinsen

Eigenschaften:

- Hydrolock™ Effekt: Die einzigartige Wirkstoffkombination aus Provitamin B5 und Sorbitol stattet Kontaktlinsen mit einem Langzeitfeuchtigkeitsdepot aus, für weniger Feuchtigkeitsverlust und spürbar mehr Tragekomfort
- Jede Seite der Kontaktlinse mit je 3 Tropfen SOLOCARE AQUA® 10 Sekunden reiben, 10 Sekunden abspülen, anschließend einlagern
- Besonders schnell: 5 Minuten Mindest-Einlagerungszeit oder über Nacht
- Aufbewahren der Kontaktlinsen bis max. 30 Tage
- Entfernt Proteine
- Microblock™: Der Kontaktlinsenbehälter aus Spezialkunststoff, dessen Silber-ionen Bakterien abtöten, bietet bessere Hygiene und höhere Sicherheit
- Neuer Behälter zu jeder Flasche

Lieferprogramm:

SOLOCARE AQUA® Erstausrüstung Art.-Nr. SA90
 Inhalt: 1 x SOLOCARE AQUA® 90 ml
 1 x SOLOCARE AQUA® Microblock™ Kontaktlinsenbehälter

SOLOCARE AQUA® 360 ml Art.-Nr. SA360

SOLOCARE AQUA® Vorratspackung Art.-Nr. SAVP
 Inhalt: 2 x SOLOCARE AQUA® 360 ml
 2 x SOLOCARE AQUA® Microblock™ Kontaktlinsenbehälter

SOLOCARE AQUA® Systempackung Art.-Nr. SASY
 Inhalt: 4 x SOLOCARE AQUA® 360 ml
 4 x SOLOCARE AQUA® Microblock™ Kontaktlinsenbehälter

SOLOCARE AQUA® Reise-Sets Art.-Nr. TRAVELSC
 Inhalt: SOLOCARE AQUA® 90ml, inkl. Behälter
 Handspiegel
 Papier-Taschentücher



AOSEPT® PLUS

AOSEPT® PLUS – Tiefenreinigung für lang anhaltenden Tragekomfort

Anwendungsempfehlung:

- Insbesondere für Silikon-Hydrogele, für weiche, aber auch für formstabile Kontaktlinsen
- Hervorragend geeignet für Austauschsysteme
- Bei empfindlichen Augen
- Seit Jahren bei Allergikern bewährt

Eigenschaften:

- Ohne Konservierungsstoffe
- Leicht in der Handhabung
- Neuer Behälter zu jeder Flasche – der Katalysator steckt fest auf dem Linsenträger, damit nichts verwechselt oder vergessen werden kann
- Mit Pluronic 17R4 für verbesserte Benetzung, verbesserte Reinigungswirkung und verbesserte Desinfektionsleistung
- Entfernt Proteine
- 5 Sekunden mit AOSEPT® PLUS das komplette Körbchen mit den Kontaktlinsen abspülen. Anschließend 6 Stunden selbsttätige Neutralisation abwarten
- Aufbewahren der Kontaktlinsen bis max. 14 Tage

Empfehlung – konsequent ohne Konservierungsstoffe:

Als Abspüllösung die konservierungsmittelfreie SoftWear® Saline Plus
360 ml Art.-Nr. SP360

Lieferprogramm:

AOSEPT® PLUS Erstausrüstung Art.-Nr. AP90

Inhalt: 1 x AOSEPT® PLUS 90 ml
1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsen-Behälter mit AODISC

AOSEPT® PLUS 360 ml Art.-Nr. APP360

Inhalt: 1 x AOSEPT® PLUS 360 ml
1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsen-Behälter mit AODISC

AOSEPT® PLUS Vorratspackung Art.-Nr. APPVP

Inhalt: 2 x AOSEPT® PLUS 360 ml
2 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsen-Behälter mit AODISC

AOSEPT® PLUS Systempack Art.-Nr. APPSY

Inhalt: 4 x AOSEPT® PLUS 360 ml
4 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsen-Behälter mit AODISC

AOSEPT® PLUS Reise-Sets Art.-Nr. TRAVELAP

Inhalt: AOSEPT® PLUS 90ml, inkl. Behälter
Handspiegel
Papier-Taschentücher



Peroxid



Unizyme®

Unizyme® – die schnelle und effektive Enzymreinigung

Anwendungsempfehlung:

– Für alle Kontaktlinsen geeignet

Eigenschaften:

- Mit allen CIBA VISION Pflegemitteln und anderen führenden Marken verwendbar
- Einfache Anwendung: Simultan mit dem sonst verwendeten Pflegemittel oder in Kochsalzlösung
- Durch Sollbruchstelle sparsame Anwendung auch in Zweikammer-Behältern
- Hohe Proteinreinigungs-Wirksamkeit durch spezielle Tablettenformulierung
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Lieferprogramm:

Unizyme® Erstausrüstung

Art.-Nr. UZS2

Inhalt: 2 Tabletten

Unizyme® Nachkaufpackung

Art.-Nr. UZ12

Inhalt: 12 Tabletten



SoftWear[®] Saline Plus

SoftWear[®] Saline Plus – die Abspüllösung für alle Kontaktlinsen

Anwendungsempfehlung:

– Für alle Kontaktlinsen geeignet

Eigenschaften:

- Ohne Konservierungsstoffe (A.B.S. Puffersystem)
- Zum Abspülen aller Kontaktlinsen
- Zum Aufbewahren desinfizierter Kontaktlinsen bis zu 30 Tagen
- Zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten
- Ideale Ergänzung zu allen konservierungsmittelfreien Peroxid-Systemen
- Inkl. Benetzer zur Unterstützung bei Reinigung für frisches und komfortables Tragegefühl

Das Lieferprogramm:

SoftWear[®] Saline Plus 360 ml Vorratsflasche

Art.-Nr. SP360

Abspülen



AQuify® AUGENTAU

AQuify® – die innovative Benetzungslösung mit Langzeitkomfort

Anwendungsempfehlung:

- Für alle Kontaktlinsen
- Bei sensiblen und trockenen Augen
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber Konservierungsmitteln

Eigenschaften:

- Anhaltender Feuchtigkeitsspender
- Außergewöhnliche Verträglichkeit durch den Inhaltsstoff Hyaluronsäure
- Lang anhaltende Nachbenetzung der Kontaktlinsen
- Klarheit von Anfang an, keine Schleierbildung nach der Anwendung
- Ohne Konservierungsstoffe (A.B.S. Puffersystem)
- Handliche Flaschengrößen: 2 und 10 ml

Das Lieferprogramm:

AQuify® 2 ml

Art.-Nr. AQ2

AQuify® 10 ml

Art.-Nr. AQ10

